
Каталог продукции ETHICON®

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи
- Гемостатические средства местного действия и другие решения для разных областей хирургии

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

VICRYL® PLUS*

(Полиглактин 910
с антибактериальным покрытием)

Синтетический рассасывающийся
многофиламентный шовный материал



VICRYL® PLUS* (Полиглактин 910 с антибактериальным покрытием)

VICRYL® PLUS* – синтетическая хирургическая плетеная нить со средним сроком рассасывания, обработанная антисептиком (триклозаном). Применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Нить имеет антибактериальное покрытие IRGACARE MP** (триклозан) для предупреждения контаминации шовного материала патогенными бактериями⁹.



Сроки рассасывания

Благодаря реакции гидролиза у нити VICRYL® PLUS* толщиной 6-0 USP*** и более в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв.

Дни имплантации	Остаточная прочность
14 суток	75%
21 сутки	50%
28 суток	25%

Срок полного рассасывания – 56–70 дней.

Покровие IRGACARE MP (триклозан)

Шовный материал VICRYL® PLUS* имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства⁹.

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком и в данной концентрации (не более 275 мкг/м) не токсичен.

Спектр антибактериальной активности покрытия Irgacare MP** (триклозан) in vitro⁸:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

* Плюс

** Иргакреа МП

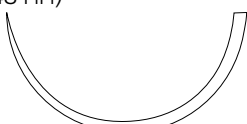
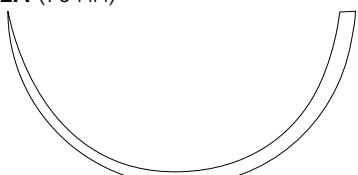
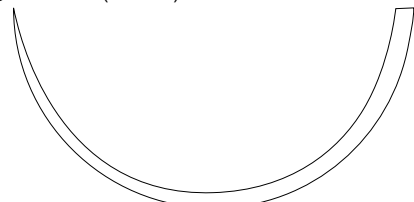
*** ЮЭСПИ

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

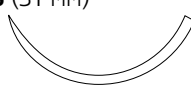
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
RB-2 (13 мм) 	45							VCP9982H	36
	70						VCP434H	VCP433H	36
TF PLUS (13 мм)  уплощенный кончик	70						VCP924H		36
RB-1 PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	70				VCP306H	VCP305H	VCP214H VCP304H	VCP303H	36
CT-3 (22 мм)  усиленная игла	70				VCP328H				36
SH-1 PLUS (22 мм) VISI Black  уплощенный кончик	70					VCP3110H			36
SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70				VCP312H	VCP311H	VCP310H		36
MO-7 (22 мм)  массивная игла	70	VCP251H	VCP250H						36
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70			VCP318H	VCP317H	VCP316H	VCP315H		36
	90			VCP244H		VCP242H			36
CT-2 (26 мм)  усиленная игла	90		VCP331H	VCP330H	VCP326H				36
MH-1 (31 мм)  усиленная игла	70					VCP319H			36
MH-1 PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	70		VCP9213H	VCP247H	VCP320H				36
MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70		VCP325H	VCP324H	VCP323H	VCP322H			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

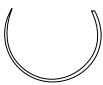
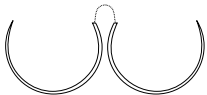
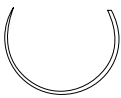
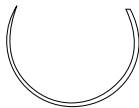
КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
⊙ CT-1 (36 мм)  усиленная игла	90	VCP348H ■	VCP347H ■	VCP346H ■	VCP345H ■	36
⊙ CT (40 мм)  усиленная игла	70		VCP353H ■	VCP352H ■	VCP351H ■	36
	90	VCP360H ■	VCP359H ■	VCP358H ■		36
⊙ MO-45 (45 мм)  массивная игла	70	VCP9246H ■	VCP9245H ■			36
⊙ CTX (48 мм)  усиленная игла	90	VCP372H ■	VCP371H ■	VCP370H ■		36
⊙ XLH (70 мм) 	120		VCP584G ■			12
⊙ MO-80 (80 мм)  массивная игла	100		VCP9289G ■			12

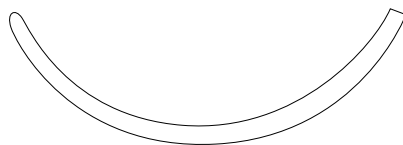
КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	4/0 (M1,5)	
⊙ C-1 (13 мм) 	70		VCP9067H ■	36
⊖ BB PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	45		VCP9074H ■	36
⊖ TE PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	70	VCP1036H ■		36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
● UR-6 (26 мм) 	70	VCP603H ■	VCP602H ■		36
● UR-6 (26 мм) 	90		VCP2593H ■		36
● MF (31 мм) 	70			VCP308H ■	36
● UR-5 (36 мм) 	70	VCP376H ■			36

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
○ BP-5 (65 мм) 	100	VCP9391G ■	12

ИГЛА-КРЮЧОК, КОЛЮЩАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
● ASH-35 (36 мм) 	70	VCP9221H 	36

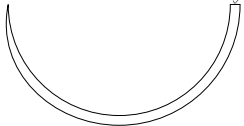
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				VCP494H ■	VCP493H ■	36
▼ PS-3 (16 мм) 	45					VCP500H ■	36
▼ FS-3 (16 мм) 	70			VCP395H ■			36
▼ FS-2 (19 мм) 	70				VCP397H ■ VCP422H ■		36
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45			VCP497H ■	VCP496H ■		36
▼ FS-1 (24 мм) 	70			VCP442H ■ VCP452H ■			36
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	45		VCP684H ■	VCP683H ■			36
▼ FSL (30 мм) 	70	VCP587H ■	VCP586H ■	VCP585H ■			36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	
▼ CP (40 мм)  усиленная игла	70			VCP479H ■	36
	90		VCP486H ■		36
▼ CPX (48 мм)  усиленная игла	70			VCP9295H ■	36
	90	VCP1059H ■	VCP1058H ■		36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▼ V-5 (17 мм) 	70			VCP987H ■			VCP994H ■	36
▼ V-6 (22 мм) 	70				VCP278H ■			36
▼ V-7 (26 мм) 	70				VCP999H ■	VCP998H ■		36
▼ V-30 (31 мм) 	70		VCP9362H ■	VCP9361H ■	VCP9360H ■			36
▼ V-34 (36 мм) 	90	VCP520H ■	VCP519H ■	VCP518H ■	VCP517H ■	VCP516H ■		36
▼ V-37 (40 мм) 	70			VCP9901H ■	VCP9900H ■			36
	90		VCP9468H ■					36
▼ V-39 (45 мм) 	70	VCP9378H ■	VCP9377H ■	VCP9376H ■	VCP9375H ■			36
▼ V-40 (48 мм)  петля	150		VCP829E ■					24

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▼ V-4 (17 мм) 	70	VCP9826H ■	VCP240H ■	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		VCP9507H ■	36
▲ PC-5 PRIME (24 мм) 	70		VCP9571H ■	36
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	VCP9582H ■		36
▲ PCLX PRIME (36 мм) 	70	VCP9532H ■	VCP9531H ■	36

ПРЯМАЯ РЕЖУЩАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▲ SC-1 (13 мм) 	45	VCP9410H 	36

ВИКРИЛ ПЛЮС БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	5x70	VCP1217E ■	VCP1216E ■	VCP1215E ■	VCP1214E ■	24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	VCP626E ■	VCP625E ■	VCP624E ■		24