



ИНТУБАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛЕГКО. ПОКА НЕ ВОЗНИКАЮТ ТРУДНОСТИ.

McGRATH® MAC
Модернизированный видеоларингоскоп

Medtronic
Further, Together

МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕШНОЙ ИНТУБАЦИИ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.¹

Перед интубацией вы готовитесь к любому варианту развития событий.

И когда пациент на столе и начинается последовательность этих критических моментов, вы готовы лучше, чем бы ни случилось.

Модернизированный видеоларингоскоп (МВЛ) McGRATH® MAC представляет собой моноблочный ручной инструмент, который сочетает в себе преимущества:

- Прямой ларингоскопии (ПЛ) — знакомая техника применения ларингоскопа Макинтош
- Видео ларингоскопии (ВЛ) — отчетливая визуализация

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВИДЕОЛАРИНГОСКОП (МВЛ) McGRATH® MAC

ИНТУИТИВНЫЙ

Используется стандартная техника ПЛ в сочетании с технологией ВЛ

ЩАДЯЩИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Улучшает доступ к дыхательным путям пациентов за счет тонкого профиля клинка²

ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ

В комплект включена батарея с запасом времени работы в 250 минут. На экране располагается индикатор заряда с поминутным отсчетом остающегося времени работы батареи

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Прошедший тест на падение с высоты двух метров МВЛ McGRATH® MAC выдержит грубое обращение и продолжит функционировать в условиях динамичной обстановки медицинского учреждения

ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАТЬ

Стерильность обеспечивается за счет использования одноразовых клинков и возможности полного погружения в жидкие среды. Экран и рукоятку можно подвергать дезинфекции высокого уровня



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
300-000-000	Рукоятка	Н/П	1
350-017-000	Клинок McGRATH® MAC, размер 2	2	50/упаковка
350-005-000	Клинок McGRATH® MAC, размер 3	3	50/упаковка
350-013-000	Клинок McGRATH® MAC, размер 4	4	50/упаковка
340-000-000	Аккумуляторная батарея на 250 минут работы	Н/П	1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рукоятка McGRATH® MAC

Размер: 180 мм x 68 мм x 110 мм

Вес: 200 г

Электропитание: Собственная аккумуляторная батарея 3.6 В (на 250 минут)

Источник света: Светодиод повышенной яркости

Дисплей: Цветовой ЖК дисплей 2.5"

Камера: CMOS

Материалы: Износостойкий термопластик для медицинского применения с сердцевинной из усиленного конструкционного сплава. Устройство и упаковка не содержат латекса.

Клинки однократного применения McGRATH® MAC

Материал: Незапотевающий оптический полимер для медицинского применения

Упаковка: Упаковывается стерильным для однократного применения.

Для заказа демонстраций и получения расценок свяжитесь с вашим локальным представителем. Более подробная информация по адресу: Medtronic.com



1. Su YC, Chen CC, Lee YK, Lee JY, Lin KJ. Comparison of video laryngoscopes with direct laryngoscopy for tracheal intubation: a meta-analysis of randomised trials. *Eur J Anaesthesiol.* 2011;28(11):788-795.
2. Levitan R, Heitz J, Sweeney M, Cooper R. The complexities of tracheal intubation with direct laryngoscopy and alternative intubation devices. *Ann Emerg Med.* 2011;57 (3):240-247.

ВАЖНО: Пожалуйста, обратитесь к руководству в упаковке для полного описания инструкций, противопоказаний, предупреждений и мер предосторожности.

©2013,2015. Все права зарегистрированы компанией Medtronic. Логотип Medtronic и Further, Together торговые марки Medtronic. Бренды сторонних организаций являются торговыми марками соответствующих владельцев. Все остальные бренды являются торговыми марками Medtronic. 15-AW-0056

Medtronic



Для связи с нами, пожалуйста, перейдите по ссылке
medtronic.eu/product-catalog

Используйте приложение
для сканирования

www.medtronic.com
ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru